

ملاحظة: إذا لم تكن بحاجة إلى تضخيم صوت إضافي، فلن تحتاج إلى الضغط على زر تضخيم الصوت الأحمر +40dB.

تحذير: استخدام تضخيم الصوت الأقصى يمكن أن يضر بالسمع!

محدد تضخيم الترددات:

أثناء المحادثة، عندما يكون زر التضخيم نشطًا، يمكنك ضبط الترددات المضخمة حسب احتياجاتك الشخصية عن طريق الضغط على زر النغمة الموجود على جانب القاعدة.

باستخدام سماعة رأس:

1. اضغط على الزر  ، وستبدأ وظيفة مضخم الصوت في العمل (سوف يضيء الزر عند تشغيل الوظيفة).
2. اتصل بالرقم المطلوب. يمكنك ضبط حجم مضخم الصوت أثناء المكالمات.
3. يُنصح بالتحدث نحو الميكروفون الموجود في مقدمة الهاتف.
4. اضغط على الزر مرة أخرى  لإنهاء المكالمات.

ملاحظة: أثناء المكالمات، يمكنك التبديل من مضخم الصوت إلى

السماعة عن طريق رفع السماعة والضغط على الزر  . لقطع

الاتصال، أعد السماعة إلى مكانها واضغط على الزر  إذا كان مضاءً.

مهم أن تعرف! يسمح وضع مضخم الصوت لشخص واحد فقط بالتحدث في كل مرة. يتم التبديل بين الميكروفون ومضخم الصوت عن طريق قياس مستوى الصوت حول الهاتف، لذلك يُنصح باستخدام وظيفة مضخم الصوت في بيئة هادئة بدون ضوضاء خلفية أو موسيقى.

زر كتم الصوت (MUTE):

يؤدي الضغط على زر كتم الصوت (MUTE)  إلى تعطيل الميكروفون على الهاتف بحيث لا يمكن للطرف الآخر سماعك.

إعادة الاتصال:

لإعادة الاتصال بالرقم الأخير الذي تم الاتصال به، ارفع السماعة واضغط على الزر .

الاتصال السريع:

يحتوي هذا الهاتف على ستة أزرار صورة للاتصال السريع وأربعة أزرار اتصال سريع عادية. يمكنك وضع صورة أو رمز تحت غطاء الزر الشفاف بحيث يكون من الأسهل على المستخدم معرفة من يتصل به. بعد حفظ الرقم في ذاكرة الزر، اضغط على زر واحد فقط للاتصال بالرقم المحفوظ.

تخزين الأرقام في الذاكرة زر الطلب السريع:

1. ارفع السماعة.
2. اضغط على زر .
3. أدخل رقم الهاتف الذي تريد تخزينه في الذاكرة.
4. اضغط على زر  مرة أخرى.
5. اضغط على أحد أزرار الذاكرة M1-M4 أو أحد أزرار الصورة حيث تريد تخزين الرقم.
6. أعد السماعة إلى القاعدة.

ملاحظة: اضغط على الزر  إذا كانت هناك حاجة لإدخال فاصل في رقم الهاتف (على سبيل المثال - عند استخدام لوحة التبديل).

الاتصال باستخدام أزرار الطلب السريع:

1. ارفع سماعة الأذن وانتظر نغمة الاتصال.
2. اضغط على أحد أزرار الاتصال السريع M4-M1 أو أحد أزرار الصورة لطلب الرقم الذي تم إدخاله في الذاكرة.

الصيانة:

نظف الهاتف باستخدام قطعة قماش مبللة فقط. لا تستخدم أي مواد تنظيف.

الضمان: جميع منتجات Amplifon تُصنع وتخضع لمراقبة الجودة باستخدام أكثر الأساليب تقدمًا. من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنتاج، تختار الشركة بعناية المواد الخام، والتقنيات، وطرق العمل التي تضمن منتجات خالية من العيوب وطول عمر استثنائي. الضمان باطل عندما يكون العطل ناتجًا عن مشاكل في الاتصال أو مشاكل في لوحة التبديل التي يتصل بها الهاتف.

الضمان لمدة 12 شهرًا من تاريخ شراء الهاتف. سيتم إصلاح أي عطل أو عيب يتم اكتشافه خلال فترة الضمان دون أي تكلفة على المشتري. أي محاولة لإصلاح من قبل طرف غير الشركة المصنعة أو مزود الخدمة تلغي صلاحية الضمان. الضرر الذي يلحق بالهاتف نتيجة الاستخدام غير السليم، التآكل الطبيعي، الكسر، الوضع غير المناسب لاستخدام الهاتف، التركيب غير الصحيح، أو القوة القاهرة أو التأثيرات الخارجية لا يغطيها هذا الضمان. في حالة الشكوى، تحتفظ الشركة بالحق في إصلاح العطل، استبدال الأجزاء، أو استبدال المنتج بالكامل. تظل الأجزاء المستبدلة ملكًا للشركة. الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستخدم أثناء الاستخدام لا يوجد إلا إذا كان هناك دليل على الإهمال أو القصد من جانب الشركة المصنعة.

إذا أظهر المنتج في حوزتك علامات عطل خلال فترة الضمان، يرجى الاتصال بمزود الخدمة الذي اشترى المنتج منه مع تقديم فاتورة الشراء الأصلية. يمكن تقديم أي طلب لإصلاح المنتج بموجب الضمان المذكور في هذا المستند فقط بعد تقييم العطل من قبل مزود الخدمة. لا يمكن طلب إصلاح المنتج بموجب الضمان بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ شراء الهاتف..

تاريخ الشراء: _____

ختم وتوقيع المتجر: _____

الشركة المصنعة: Amplifon إيطاليا

المستورد: مجموعة جيتير، شمشون 7، بتاح تكفا

بلد التصنيع: الصين

تعليمات التشغيل للهاتف المضخم PicTel 400



يرجى قراءة تعليمات التشغيل قبل استخدام الهاتف لأول مرة.
يوصى بالاحتفاظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل..

تحذيرات:

1. تجنب تعريض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة، الدخان، الاهتزازات القوية، الحرارة، الرطوبة، أو المواد الكيميائية.
2. في حالة حدوث عطل، اتصل بمزود الخدمة. لا تفتح أو تحاول إصلاح الهاتف بنفسك!
3. استخدام التضخيم الأقصى يمكن أن يضر بالسمع.

الغرض من الاستخدام:


الجهاز مخصص لإجراء واستقبال المكالمات داخل شبكة الهاتف. أي استخدام لأغراض أخرى يقع تحت تعريف الاستخدام غير السليم. يرجى فحص تعليمات الاستخدام الخاصة بالشبكة المحلية قبل الاستخدام. أي تعديل في الهاتف (في البرمجة أو التركيب) محظور.

محتويات العبوة:

1. قاعدة الهاتف
2. سماعة ألقون
3. كابل سماعة الرأس إلى القاعدة
4. تعليمات التشغيل
5. كابل الاتصال بمقبس الهاتف

توصيل الهاتف:

1. قم بتوصيل الكابل الملفت بالسماعة وبقاعدة الهاتف في المقبس المحدد في الخلف.
2. قم بتوصيل كابل الهاتف بمقبس الجدار والطرف الآخر في المقبس أسفل الهاتف.
3. مرر كابل الهاتف في الفتحة المخصصة أسفل الهاتف.
4. ارفع السماعة وتأكد من سماع نغمة الاتصال.

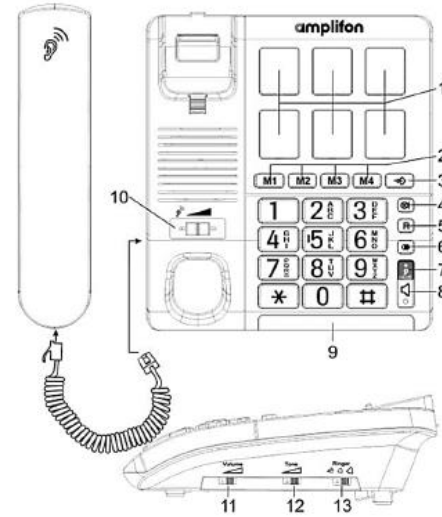

أجزاء الهاتف:

1. أزرار الصور للاتصال السريع
2. أزرار الاتصال السريع
3. ادخال رقم في الذاكرة
4. كتم الصوت (MUTE)
5. إشارة (FLASH)
6. إعادة الاتصال
7. تضخيم إضافي (+40dB)
8. مكبر الصوت
9. لمبة LED
10. محدد حجم سماعة الرأس في وضع التضخيم
11. محدد حجم سماعة الرأس
12. محدد تضخيم الترددات
13. محدد حجم الرنين

تشغيل الهاتف

إجراء مكالمة:

1. ارفع سماعة الأذن وانتظر سماع نغمة الاتصال.
2. باستخدام المفاتيح، أدخل رقم الهاتف أو اضغط على صورة الشخص الذي تريد الاتصال به.
3. لإنهاء المكالمة، أعد السماعة إلى مكانها. يمكنك ضبط حجم سماعة الرأس باستخدام المفاتيح الجانبية للهاتف.

استقبال مكالمة:

عند سماع رنين الهاتف، ارفع السماعة من القاعدة لاستقبال المكالمة.

تحويل المكالمات (عند الاتصال بلوحة التبديل):

اضغط على زر **R** على قاعدة الهاتف ثم اضغط على رقم الامتداد الذي تريد تحويل المكالمة إليه. للوصول إلى خيارات إضافية في لوحة التبديل، اضغط على زر **R** ثم **#** أو ***** لمزيد من المعلومات، يُنصح بالاتصال بمشغل لوحة التبديل.

اضبط مستوى صوت الرنين:



استخدم محدد حجم الرنين لتحديد حجم الرنين المطلوب (صوت عالٍ/صوت منخفض/بدون صوت).

تضخيم إضافي وتحديد حجم المكالمة:

يمكن زيادة حجم مستقبل الصوت بمقدار 40 ديسيبل إضافية أثناء المكالمة، عن طريق الضغط على زر +40dB.

سيضيء الضغط على هذا الزر مؤشر التضخيم الإضافي.



يمكن زيادة حجم سماعة الرأس باستخدام الزر (الموجود أسفل السماعة) إلى حجم الاستماع المطلوب (1-4).

يمكن إيقاف التضخيم الإضافي عن طريق الضغط على الزر الأحمر +40dB في أي وقت أثناء المكالمة. سينطفئ مؤشر التضخيم وسيعود حجم المكالمة إلى الوضع الطبيعي. في نهاية كل مكالمة، سيؤدي إعادة السماعة إلى القاعدة إلى إعادة حجم الاستماع إلى الوضع الطبيعي.

شهادة الضمان

يتم تصنيع منتجات AllBeurer وتخضع لمراقبة الجودة باستخدام أكثر الأساليب تقدمًا. من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنتاج، تختار الشركة بعناية المواد الخام، والتقنيات، وطرق العمل التي تضمن منتجات خالية من العيوب وطول عمر استثنائي.

مسؤوليتنا بموجب هذه الشهادة هي إصلاح (إما بأنفسنا أو من خلال شخص نيابة عنا) أي عيب أو خلل أو عطل (فيما يلي "العطل") تم اكتشافه في المنتج خلال فترة الضمان و/أو استبداله (كليًا أو جزئيًا) حسب الحاجة، دون تكلفة، وفقًا لما يلي وباستثناء الحالات التي يثبت فيها أن العطل نتج عن تلف متعمد من قبل المستهلك.

على الرغم مما سبق ودون الانتقاص من عمومية ما سبق، إذا أثبتت شركة Getter قبل إصلاح المنتج أن العطل نتج عن أحد الأسباب التالية، فإن الضمان بموجب هذه الشهادة لن يسري، ويحق لشركة Getter المطالبة بدفع تكلفة الإصلاح، النقل، و/أو الاستبدال:

سوء نية أو إهمال من قبل المستهلك، مثل (ودون الانتقاص من عمومية ما سبق) الكسر لأيّ سبب كان، الضرر بالمعدات بسبب إهمال المستخدم أو تقصيره، إمداد طاقة غير منتظم، حريق أو التعرض لمصدر حرارة، تبلل المنتج بأي سائل، دخول جسم غريب، نقل مهمل أو حادث. أي محاولة لإصلاح من قبل طرف غير الشركة المصنعة أو مزود الخدمة تلغي الضمان.

إذا ظهرت على منتجك علامات عطل خلال فترة الضمان يرجى الاتصال بمزود الخدمة الذي اشترت المنتج منه مع تقديم فاتورة الشراء الأصلية، أو الاتصال بالمستورد باستخدام التفاصيل أدناه. يمكن تقديم أي طلب للإصلاح بموجب الضمان المفصل في هذا المستند فقط بعد تقييم العطل من قبل مزود الخدمة أو المستورد.

لا يغطي ضماننا أي أضرار غير مباشرة و/أو مباشرة ناتجة عن تشغيل منتج غير سليم و/أو تشغيل غير مطابق لتعليمات الشركة المصنعة، وفي أي حال، لن تكون شركة Getter و/أو ممثليها مسؤولين عن أي أضرار.

لا تنص محتويات هذه الشهادة على حقوق المستهلك بموجب أيّ قانون.

تخضع أحكام شهادة الضمان هذه حصريًا لقوانين دولة إسرائيل، وتكون الولاية القضائية فيما يتعلق بهذه الشهادة لمحاكم تل أبيب- يافا المختصة فقط.

اسم المنتج والطراز: _____
مكان وتاريخ الشراء: _____
* شهادة الضمان صالحة مع إثبات الشراء (فاتورة، إيصال).