


## تعليمات تشغيل جهاز سمع BELLMAN AUDIO MINO

شكرًا على شرائكم لجهاز سمع BELLMAN AUDIO MINO فيما يلي تعليمات التشغيل:

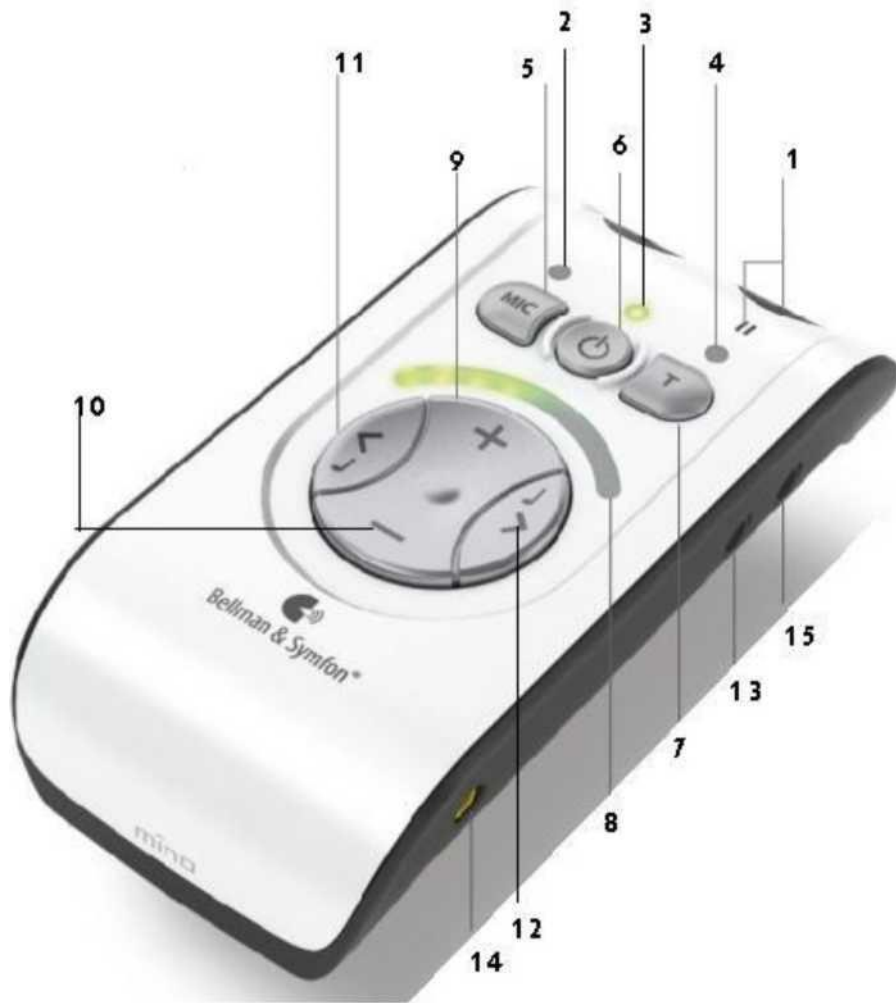

من المهم للغاية، قبل تشغيل الـ MINO لأول مرة (بعد الشراء) ينبغي القيام بالشحن الأولي لمدة ساعتين ونصف على الأقل وذلك لضمان عمر البطارية السليم.

## الفتح والتركيب

1. قم بتوصيل السماعات أو خطاف التحريض الكهربائي لمخرج السماعات (13) على الجانب الأيمن من الجهاز.
2. اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل/ إيقاف التشغيل (6) لتشغيل الـ MINO. ستضيئ المصابيح (3) و(2) فوق زر تحديد الميكروفون و(5) وزر التشغيل (6) حينما سيبدأ الجهاز في أداء وظيفته. عند تشغيل الـ MINO، فإن الإعداد الافتراضي هو استخدام ميكروفون الاتجاه الذي يستقبل ما جاء في مقدمة الجهاز (1) كمصدر صوت.

## ضبط الجهاز

2- 3) (النوريات . MINO כדי להפעיל את ה) 6) לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההדלקה/כיבוי. 2) ידלקו כאשר המכשיר יתחיל לפעול. כאשר 6) (וכפתור ההדלקה) 5) (מעל כפתור בחירת המיקروفון מופעל, ברירת המחדל היא שימוש במיקروفון הכיווני- הקולט את הנאמר בקדמת MINO ה. כמקור קול) 1) (המכשיר اضبط شدة الصوت من خلال أزرار تكبير/ تخفيض شدة الصوت (9-10). حيث يزيد الزر العلوي شدة الصوت والزر السفلي يخفض شدة الصوت (8). وستنطفئ المصابيح بعد ثوان. اضبط نوعية الصوت من خلال أزرار تكبير/ تخفيض النغمة (تأكيد الأصوات العالية) (11-12). الزر الأيمن (12) يرفع والزر الأيسر (11) يضعف النغمة. وكلما زادت شدة النغمات، فسيتحرك المصباح طوال مؤشر شدة الصوت والنغمة نحو اليمين (8).

سينطفئ المصباح بعد 3 ثوان.

بعد الانتهاء من الاستخدام سيكون بإمكانك إيقاف تشغيل الـ MINO من خلال الضغط مدة 3 ثوان على زر التشغيل/ إيقاف التشغيل (6).

## اتجاه مصدر الصوت

لدى MINO إمكانية استقبال بوضع T (التحريض الكهربائي). ومن خلال الضغط على زر (7) سيتم تشغيل المصباح (4). للعودة إلى وضع الميكروفون الاتجاهي ينبغي الضغط على الزر (5)، ليتم تشغيل المصباح (2).

## الميكروفون الدائري

الضغط على زر الـ mic (5) سيحوّل الميكروفون إلى وضع دائري- استقبال كافة النغمات، حيث سيتحول في هذا الوضع مصباح الإشارة (2) من اللون الأخضر إلى الأحمر.

الضغط الآخر على الزر سيعيد الميكروفون إلى الوضع السابق للميكروفون الاتجاهي ليعود المصباح للون الأخضر.

## مصباح البطارية الضعيفة

مصباح الضبط (3) سيومض بالضوء الأخضر إذا كانت البطارية الداخلية ضعيفة وتطلب شحنها. عند تحول المصباح إلى الضوء البرتقالي سيظهر الجهاز أن البطارية نفذت وأن إيقاف التشغيل سيتم قريباً. ينبغي شحن الجهاز من خلال توصيل جهاز الشحن الأصلي بالتوصيل المناسب (14).

### تعليمات السلامة لاستخدام مورد طاقة

- امنع تسرب الماء أو الرطوبة.
- أبعد عن درجات الحرارة الشديدة والأجهزة الباعثة للحرارة، مثل المشعاع، والفرن الساخن أو المكان المعرض لأشعة الشمس.
- أبعد عن الشموع المتوهجة، النار المكشوف، السجائر وغيرها.
- امنع سقوط الأجسام أو رش السوائل على المورد.
- تجنب ملامسة السوائل الخطرة، مثل الأحماض.
- اربط بمقبس مناسب فقط (على النحو المحدد على المورد).
- افصل المورد عن الكهرباء من خلال سحب المقبس فقط. لا يجوز السحب من الكابل.
- تأكد من أن الكابل موجه لكيلا يشكل خطر الوطء أو يفسل.
- **تحذير:** لا يجوز أبداً استبدال الفتيل أو المقبس ببدايل غير أصلية. وإذا لم يكن المقبس مناسباً للمقبس، فاستخدم المهائئ المناسب حسب توصية الجهة المصنعة. وقد يسبب التوصيل الخاطئ تكهرب المستخدم.
- عند استخدام كابل التمديد ينبغي التأكد من صلاحية موصل التأريض ضمن الكابل.
- مصمم لاستخدام الوجه فقط وليس في مكان معرض للمطر وغير ذلك.
- ينبغي الحرص وصيانة الجهاز في وضع وظيفي جاهز للاستخدام.
- ينبغي إتاحة الوصول السهل إلى التوصيل وفصل مقبس التغذية عن شبكة الكهرباء.
- تيار إمدادات المخرج – 5.0V 1000mA

### تحذير بشأن تعرض البطارية للحرارة

**تحذير!** لا يجوز تعريض البطارية أو رزمة البطارية للحرارة الشديدة مثل ضوء الشمس، النار وما شابه.

لا يجوز إلقاء البطارية في القمامة إلا في منشآت إعادة التدوير المخصصة لذلك.