

מדריך הפעלה PockeTalker 2.0

אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה מבית אודיוקר תקשורת בע"מ. אביזר עזר בעל עוצמה ואיכות לשמיעה טובה יותר בכל סטואציה תוצרת חברת Williams Sound ארצות הברית. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת, שתוכל להפיק את מרב התועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. המגבר האישי אינו מיועד, נמכר או מפורסם כתחליף למכשיר שמיעה.

מומלץ לכל כבד שמיעה להיבדק ע"י אנשי מקצוע מתאימים לבירור הסיבה ועוצמת הירידה בשמיעה טרם השימוש במגבר אישי זה.

הוראות בטיחות – הגן על שמיעתך

שים לב! מוצר זה מיועד להגברת צלילים וקולות לעוצמה שמע גבוהה במיוחד אשר עלולה לגרום לנזק בשמיעה בשימוש ממושך. בכדי להגן על השמיעה שלך ושל אחרים יש:


- לוודא שעוצמת השמע של המגבר נמוכה לפני השימוש באוזניות ורק לאחר מכן לכוון לעוצמה שמע נוחה ונעימה.
- תמיד כוון את המגבר לעוצמת השמע המינימאלית הזקוקה לך.
- אם אתה חוות צליל פידבק או שריקה יש להנמיך את העוצמה ולהרחיק את המיקרופון מהאוזניות.
- אין לאפשר לילדים או לאדם שלא קרא הוראות אלו להשתמש במכשיר.

הוראות בטיחות – שימוש בסוללות

מכשיר זה מגיע עם סוללות אלקליין שאינן נטענות. אין לנסות להטעין סוללות אלו שכן זה עלול לגרום לפיצוץ, שיחורור כימיכליים רעילים, כוויות או נזק אחר לך או לסביבה.

שימוש בפעם הראשונה

1. המגבר משתמש בשתי סוללות AAA לתוך חלקן.
2. פתח את מכסה בית הסוללה בלחיצה ומשיכתו מטה.
3. הכנס שתי סוללות חד פעמיות מסוג AAA לתוך תא הסוללות. הקפד על כיוון נכון של ניגודיות (+/-) בהתאם למצוין בתא הסוללה.
4. החזר את מחסה בית הסוללה למקומו.
5. למגבר מיקרופון פנימי אך מומלץ גם לחבר אליו את המיקרופון אשר מגיע בתוך הערכה.
6. חבר אוזניות לשקע המתאים המסומן ב . ניתן לחבר גם לולאת השראה לשימוש עם מצב T במכשיר השמיעה שלך.
7. הדלק את המגבר ע"י סיבוב הכפתור בחזית המגבר עד לעוצמת הקול הרצויה, נורית חיווי ירוקה תדלק. כאשר הסוללה תהיה חלשה האור יהבהב.
8. הגבר את עוצמת השמע הרצויה ע"י סיבוב הכפתור.
9. כוון את גובה (גוון) השמע ע"י סיבוב הכפתור הצידי, סיבוב למעלה לכיוון ה (+) לקבלת צלילים גבוהים, וסיבוב כלפי מטה לכיוון ה (-) להגברת צלילים נמוכים (Bass). לחצרה למצב נורמלי סובב עד אשר הנקודה הלבנה שבגלל תגיע לאמצע.

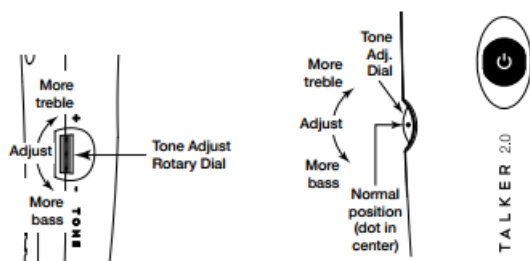

אחריות

כל מוצרי חברת Williams Sound מיוצרים ועוברים בקרת איכות בשיטות המתקדמות ביותר. משלב התכנון ועד לשלב הייצור מקפידה החברה לבחור את חומרי הגלם, הטכנולוגיות ושיטות העבודה אשר יבטיחו מוצרים נטולי תקלות ועם אורך חיים ארוך במיוחד.

האחריות הינה ל-12 חודשים מתאריך רכישת המכשיר. כל תקלה או פגם המתגלה במהלך תקופת האחריות יתוקן ללא עלות מצד הרוכש. כל ניסיון תיקון על ידי צד שאינו היצרן או ספק השירות מבטל את תוקף האחריות. נזק שיגרם למכשיר עקב שימוש שאינו מתאים, בלאי טבעי, שבר, מיקום שאינו מתאים לשימוש המכשיר, התקנה לא נכונה או אירוע של כח עליון או השפעה של גורמים חיצוניים אינם מכוסים תחת אחריות זאת. בכל מקרה של תלונה, שמורה לחברה הזכות לתקן את הפגם, להחליף חלקים או את המוצר בשלמותו. חלקים מוחלפים נשארים בבעלות החברה. הזכות לקבלת פיצוי עקב נזק שנגרם למשתמש בזמן השימוש אינה קיימת כל עוד אין הוכחה להזנחה או לכוונת תחילה מצד היצרן.

אם המוצר שברשותך מראה סימנים של תקלה בזמן תקופת האחריות אנא פנה אל ספק השירות ממנו קנית את המוצר תוך הצגת חשבונית הקניה המקורית. כל פניה בנוגע לתיקון במסגרת האחריות המפורטת במסמך זה יכולה להתבצע לאחר הערכת התקלה אצל ספק השירות. לא ניתן לפנות לתיקון המוצר תחת אחריות לאחר שחלפה שנה ממועד רכישת המוצר.

תאריך רכישה: _____

חותמת וחתימת בית העסק: _____