

## دليل التشغيل PockeTalker 2.0

شكرًا لك على شراء هذا المنتج من AudioCare Communications Ltd. إنه ملحق ذو قوة وجودة لتحسين السمع في أي موقف، تم تصنيعه بواسطة Williams Sound الولايات المتحدة. يرجى قراءة تعليمات التشغيل الواردة في هذا الكتيب بعناية حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من الجهاز، مع الالتزام بتعليمات السلامة. مُضخم الصوت الشخصي غير مخصص أو يباع أو يعلن عنه كبديل لجهاز السمع.

يوصى بفحص كل شخص ضعيف السمع من قبل متخصصين مناسبين لتوضيح سبب وشدة فقدان السمع قبل استخدام هذا مضخم الصوت الشخصي.

### تعليمات السلامة – حماية سمعك

يرجى الملاحظة! تم تصميم هذا المنتج لتضخيم الأصوات والأصوات إلى مستوى صوت مرتفع للغاية قد يتسبب في تلف السمع مع الاستخدام المطول. لحماية سمعك وسمع الآخرين، يجب عليك:


- التأكد من أن مستوى صوت مضخم الصوت منخفض قبل استخدام سماعات الرأس وبعد ذلك فقط اضبط على مستوى صوت مريح وممتع.
- ضبط مضخم الصوت دائمًا على الحد الأدنى لمستوى الصوت الذي تحتاجه.
- إذا واجهت صوت صدى أو صفير، قم بخفض مستوى الصوت وحرك الميكروفون بعيدًا عن سماعات الرأس.
- لا تسمح للأطفال أو أي شخص لم يقرأ هذه التعليمات باستخدام الجهاز.

### تعليمات السلامة – استخدام البطاريات

يأتي هذا الجهاز مع بطاريات قلووية غير قابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إعادة شحن هذه البطاريات لأن ذلك قد يتسبب في حدوث انفجار أو إطلاق مواد كيميائية سامة أو حروق أو أضرار أخرى لك أو للبيئة.

### الاستخدام لأول مرة

1. يستخدم مضخم الصوت بطاريتين AAA غير قابلة لإعادة الشحن.
2. افتح غطاء حجرة البطارية بالضغط عليه وسحبه لأسفل.
3. أدخل بطاريتين AAA غير قابلة لإعادة الشحن في حجرة البطارية. تأكد من محاذاة القطبية بشكل صحيح (+/-) كما هو موضح في حجرة البطارية.
4. أعد غطاء حجرة البطارية إلى مكانه.
5. يحتوي مضخم الصوت على ميكروفون داخلي، ولكن يوصى أيضًا بتوصيل الميكروفون الخارجي المتوفر مع عبوة المنتج.
6. قم بتوصيل سماعات الرأس بالمقبس المقابل المميز به . يمكنك أيضًا توصيل حلقة حثية لاستخدامها مع وضع T في جهاز السمع الخاص بك.
7. قم بتشغيل مضخم الصوت عن طريق تحويل الزر الموجود في مقدمة مضخم الصوت إلى مستوى الصوت المطلوب، ستضيء إشارة ضوئية خضراء. عندما تكون البطارية ضعيفة، ستومض الإشارة الضوئية.
8. قم بزيادة مستوى الصوت المطلوب عن طريق تدوير الزر.
9. اضبط درجة الصوت (تدرج اللون) عن طريق تدوير الزر الجانبي، والتحول لأعلى نحو (+) للأصوات العالية، والتدوير لأسفل نحو (-) لتضخيم النغمات المنخفضة (Bass). للعودة إلى الوضع الطبيعي، قم بالتدوير حتى تصل النقطة البيضاء في هذا الاتجاه إلى المنتصف.

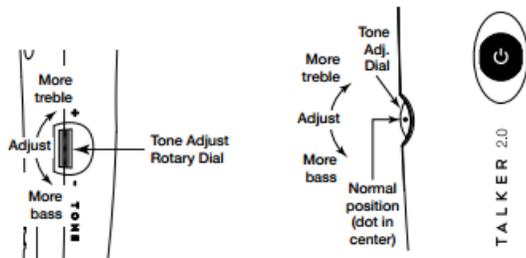

## الضمان

تُصنع جميع منتجات Williams Sound وتخضع لمراقبة الجودة باستخدام أكثر الأساليب تقدمًا. من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنتاج، تختار الشركة بعناية المواد الخام، والتقنيات، وطرق العمل التي تضمن منتجات خالية من العيوب وطول عمر استثنائي.

الضمان لمدة 12 شهرًا من تاريخ شراء الجهاز. سيتم إصلاح أي عطل أو عيب يتم اكتشافه خلال فترة الضمان دون أي تكلفة على المشتري. أي محاولة لإصلاح من قبل طرف غير الشركة المصنعة أو مزود الخدمة ستلغي صلاحية الضمان. الضرر الذي يلحق بالجهاز نتيجة الاستخدام غير السليم، التآكل الطبيعي، الكسر، الوضع غير المناسب لاستخدام الجهاز، التركيب غير الصحيح، أو قوة قاهرة أو تأثيرات خارجية لا تغطيها هذه الضمانة. في أي حالة شكوى، تحتفظ الشركة بالحق في إصلاح العيب، استبدال الأجزاء، أو استبدال المنتج بأكمله. تظل الأجزاء المستبدلة ملكًا للشركة. لا يوجد حق في التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستخدم أثناء الاستخدام ما لم يكن هناك دليل على الإهمال أو القصد من جانب الشركة المصنعة.

إذا أظهر المنتج في حوزتك علامات عطل خلال فترة الضمان، يرجى الاتصال بمزود الخدمة الذي اشترى المنتج منه مع تقديم فاتورة الشراء الأصلية. يمكن تقديم أي طلب لإصلاح المنتج بموجب الضمان المذكور في هذا المستند فقط بعد تقييم العطل من قبل مزود الخدمة. لا يمكن طلب إصلاح المنتج تحت الضمان بعد مرور عام من تاريخ شراء المنتج.

تاريخ الشراء: \_\_\_\_\_

ختم وتوقيع المتجر: \_\_\_\_\_

## شهادة الضمان

يتم تصنيع منتجات AllBeurer وتخضع لمراقبة الجودة باستخدام أكثر الأساليب تقدماً. من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنتاج، تختار الشركة بعناية المواد الخام، والتقنيات، وطرق العمل التي تضمن منتجات خالية من العيوب وطول عمر استثنائي.

مسؤوليتنا بموجب هذه الشهادة هي إصلاح (إما بأنفسنا أو من خلال شخص نيابة عنا) أي عيب أو خلل أو عطل (فيما يلي "العطل") تم اكتشافه في المنتج خلال فترة الضمان و/أو استبداله (كلياً أو جزئياً) حسب الحاجة، دون تكلفة، وفقاً لما يلي وباستثناء الحالات التي يثبت فيها أن العطل نتج عن تلف متعمد من قبل المستهلك.

على الرغم مما سبق ودون الانتقاص من عمومية ما سبق، إذا أثبتت شركة Getter قبل إصلاح المنتج أن العطل نتج عن أحد الأسباب التالية، فإن الضمان بموجب هذه الشهادة لن يسري، ويحق لشركة Getter المطالبة بدفع تكلفة الإصلاح، النقل، و/أو الاستبدال:

سوء نية أو إهمال من قبل المستهلك، مثل (ودون الانتقاص من عمومية ما سبق) الكسر لأي سبب كان، الضرر بالمعدات بسبب إهمال المستخدم أو تقصيره، إمداد طاقة غير منتظم، حريق أو التعرض لمصدر حرارة، تبلل المنتج بأي سائل، دخول جسم غريب، نقل مهمل أو حادث. أي محاولة لإصلاح من قبل طرف غير الشركة المصنعة أو مزود الخدمة تلغي الضمان.

إذا ظهرت على منتجك علامات عطل خلال فترة الضمان يرجى الاتصال بمزود الخدمة الذي اشترت المنتج منه مع تقديم فاتورة الشراء الأصلية، أو الاتصال بالمستورد باستخدام التفاصيل أدناه. يمكن تقديم أي طلب للإصلاح بموجب الضمان المفصل في هذا المستند فقط بعد تقييم العطل من قبل مزود الخدمة أو المستورد.

لا يغطي ضماننا أي أضرار غير مباشرة و/أو مباشرة ناتجة عن تشغيل منتج غير سليم و/أو تشغيل غير مطابق لتعليمات الشركة المصنعة، وفي أي حال، لن تكون شركة Getter و/أو ممثليها مسؤولين عن أي أضرار.

لا تنص محتويات هذه الشهادة على حقوق المستهلك بموجب أي قانون.

تخضع أحكام شهادة الضمان هذه حصرياً لقوانين دولة إسرائيل، وتكون الولاية القضائية فيما يتعلق بهذه الشهادة لمحاكم تل أبيب-يافا المختصة فقط.

اسم المنتج والطراز: _____
مكان وتاريخ الشراء: _____
* شهادة الضمان صالحة مع إثبات الشراء (فاتورة، إيصال).