



 **amplicomms**

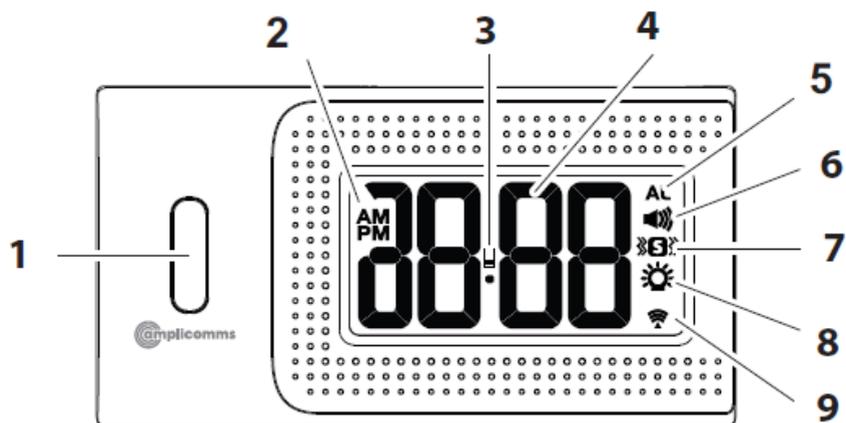

TCL 250

TCL 250

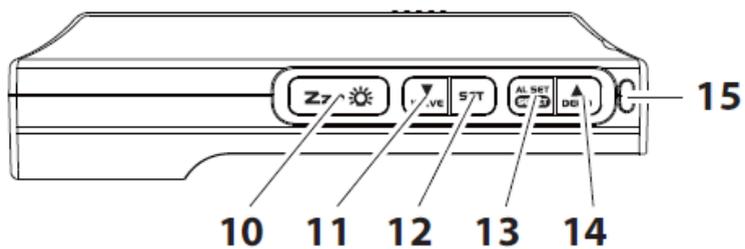

TCL 250

- 1 ضوء وميض / فلاش
- 2 مؤشر "صباح/ مساء"
- 3 مؤشر "البطارية منخفضة"
- 4 الوقت
- 5 وضع ضبط المنبه
- 6 مؤشر "تشغيل منبه الصوت"
- 7 مؤشر "تشغيل منبه الهزاز"
- 8 مؤشر "تشغيل منبه ضوء الوميض / الفلاش"
- 9 مؤشر "استقبال إشارة الوقت التي يتم التحكم بها عبر الراديو"
- 10 زر الغفوة / الإضاءة الخلفية
- 11 **WAVE** / زر ▼
- 12 زر **SET**
- 13 زر **AL SET** / **SELECT**
- 14 زر **DEMO** / زر ▲
- 15 حلقة تثبيت للحبل

محتويات العلبة

- ساعة منبه
- حبل مع مشبك (للتثبيت على سبيل المثال بالوسادة)
- حقيبة سفر (من القماش)
- دليل المستخدم


تركيب البطاريات

لتشغيل ساعة المنبه الخاصة بك، تحتاج إلى 3 بطاريات قلوية من نوع AA (غير مشمولة).

1. ضع الجهاز مقلوبًا على سطح ناعم ومستو.

2. اسحب غطاء البطارية في الجزء السفلي من الجهاز وأزله.

3. أدخل 3 بطاريات قلوية من نوع AA مع مراعاة علامات القطبية الصحيحة "+" و "-" في حجرة البطارية.

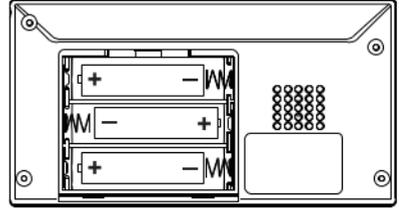

4. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

ملاحظات:

- الاستخدام المتكرر لمنبه الهزاز، وضوء الوميض / الفلاش، والمنبه الصاخب سيؤثر بشكل كبير على عمر البطارية.
- يظهر رمز البطارية الفارغة بين أرقام الوقت عندما تكون البطارية منخفضة.
- تخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا للتعليمات.

تأثيرات استقبال الإشارة البيئية

تحصل ساعتك التي يتم التحكم بها عبر الراديو على الوقت الدقيق باستخدام التكنولوجيا اللاسلكية. قد تتأثر قدرة الاستقبال، مثلها مثل جميع الأجهزة اللاسلكية، ولكنها ليست مقتصرة على الظروف التالية:

- مسافة الإرسال الطويلة
 - الجبال والأودية القريبة
 - بين المباني العالية
 - بالقرب من كابل الجهد العالي للسكك الحديدية، إلخ
 - بالقرب من الطرق السريعة، المطارات، إلخ
 - بالقرب من مواقع البناء
 - داخل المباني الخرسانية
 - بالقرب من الأجهزة الكهربائية
 - بالقرب من أجهزة الحاسوب وأجهزة التلفزيون
 - داخل المركبات المتحركة
 - بالقرب من الهياكل المعدنية
- ضع ساعتك في مكان به إشارة مثالية، أي بالقرب من النافذة وبعيدا عن الأسطح المعدنية أو الأجهزة الكهربائية.

ملاحظة: يرجى إبقاء ساعتك على بعد متر / ثلاثة أقدام من أي إلكترونيات أخرى للحصول على أفضل استقبال **DCF / MSF**.

استقبال إشارة الوقت التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو

بعد تشغيل ساعتك، تبدأ في استقبال إشارة الوقت التي يتم التحكم فيها. ال  المؤشر يومض.

- استقبال الإشارة (ال  المؤشر يومض)
- استقبال ناجح (ال  يصبح المؤشر ثابت)
- فشل الاستقبال (ال  يخفي المؤشر).

استقبال تلقائي واستقبال يدوي

استقبال تلقائي

تبدأ ساعتك في الاستقبال التلقائي كل يوم في الساعة 1:00، 2:00 و 3:00. إذا فشلت في استقبال إشارة الوقت التي يتم التحكم بها عبر الراديو في الساعة 3:00، ستبدأ في الاستقبال في الساعة 4:00. إذا فشلت مرة أخرى، ستبدأ في الاستقبال في الساعة 5:00. إذا فشلت مرة أخرى، ستبدأ في الاستقبال التلقائي في الساعة 1:00 في اليوم التالي.



خلال الاستقبال، لا تعمل جميع الأزرار باستثناء الزر .

الاستقبال اليدوي

ببساطة اضغط مع الاستمرار على زر **WAVE/▼** للدخول إلى وضع الإعداد اليدوي. ستبدأ ساعة المنبه الخاصة بك في الاستقبال اليدوي مع صدور صوت قصير. لإيقاف الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر **WAVE/▼** مرة أخرى.

ضبط الوقت ومدة الغفوة

(الوقت الافتراضي هو 0:00 وتنسيق الوقت 24 ساعة)

1. اضغط مع الاستمرار على زر **SET** حتى يبدأ الرقم "00" في الوميض. اضغط على ▲ / ▼ لضبط المنطقة الزمنية (حتى ±12 ساعة).

"00" = GMT +1 ساعة (مثل ألمانيا)

"01" = GMT +2 ساعة (مثل فنلندا)

"-01" = الساعة 00 بتوقيت جرينتش (مثل المملكة المتحدة)

2. اضغط على **SET** مرة أخرى، تومض أرقام الساعة. اضغط على ▲ أو ▼ لضبط الوقت بالساعات (اضغط باستمرار على ▲ / ▼ للتقدم بسرعة).

3. اضغط على **SET** مرة أخرى، وميض أرقام الدقيقة "00". اضغط على ▲ أو ▼ لضبط الوقت بالدقائق (اضغط باستمرار على ▲ / ▼ للتقدم بسرعة).

4. اضغط على **SET** مرة أخرى، تعرض الشاشة تنسيق الوقت والومضات. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد تنسيق الوقت "12 ساعة" أو "24 ساعة".

إذا تم تحديد "12 ساعة"، فسيظهر مؤشر **AM / PM**.

5. اضغط على **SET** مرة أخرى، تظهر الشاشة "05" ويومض. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد وقت الغفوة من 5 إلى 60 دقيقة.

6. اضغط على **SET** مرة أخرى أو لا زر حوالي 10 ثوان للخروج من وضع الإعداد.

ضبط المنبه

1. اضغط مع الاستمرار على زر **AL SET/SELECT** ليظهر مؤشر **AL** وتبدأ أرقام الساعات للمنبه في الوميض. اضغط على **▲** أو **▼** لضبط المنبه بالساعات (اضغط مع الاستمرار على **▲/▼** للتقدم بسرعة).
2. اضغط على **AL SET/SELECT** مرة أخرى لوميض أرقام الدقائق للمنبه. اضغط على **▲** أو **▼** لضبط المنبه بالدقائق (اضغط مع الاستمرار على **▲/▼** للتقدم بسرعة).
3. اضغط على **AL SET/SELECT** مرة أخرى ليبدأ المؤشر في الوميض ويعرض شاشة العرض "HI" الاهتزاز عند مستوى (HI) اضغط على **▲** أو **▼** لاختيار مستوى الاهتزاز.
 - HI (مستوى اهتزاز قوي)
 - LO (مستوى الاهتزاز خفيف)
4. اضغط على **AL SET/SELECT** مرة أخرى ليبدأ المؤشر في الوميض ويعرض شاشة العرض "HI" اضغط على **▲** أو **▼** لاختيار مستوى صوت المنبه.
 - LO (خفيف)
 - مرحبا (عالي)
5. اضغط على **AL SET / SELECT** مرة أخرى أو لا يوجد زر حوالي 10 ثوان للخروج من وضع إعداد التنبيه.

اختيار وضع المنبه

1. في وضع عرض الوقت العادي، اضغط على **AL SET/SELECT** مرة واحدة في كل مرة لتفعيل المنبه (المنبهات) وستظهر مؤشرات المنبهات المقابلة على الشاشة:

☀️ : تفعيل منبه الهزاز فقط

🔊☀️ : تفعيل منبه الصوت والهزاز معاً

🔊☀️🔌 : تفعيل منبه ضوء الوميض والهزاز معاً

🔊☀️🔌🔊 : تفعيل ضوء الوميض والصوت والهزاز معاً

2. اضغط على **AL SET/SELECT** مرة أخرى لإيقاف جميع المنبهات (☀️، 🔊، 🔌، 🔊🔌) والـ ☀️ وستختفي جميع مؤشرات المنبه.

إيقاف وإعادة ضبط المنبه

عند سماع صوت المنبه، يومض مؤشر المنبه المقابل. اضغط على **AL SET/SELECT** مرة واحدة لإيقاف المنبه وإعادة ضبطه ليعمل في اليوم التالي. بعد ذلك، سيبقى مؤشر المنبه المقابل على الشاشة.

استخدام وظيفة الغفوة

عندما يصدر صوت المنبه، اضغط على زر الـ  مرة واحدة، وسيتم إيقاف المنبه مؤقتاً ويستمر مؤشر التنبيه المقابل في الوميض. سيأتي المنبه مرة أخرى بعد انتهاء مدة الغفوة المحددة.


استخدام الإضاءة الخلفية

أثناء عرض الوقت العادي، اضغط لفترة وجيزة على زر الـ  لتشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة لمدة 5 ثوان. هذه الوظيفة غير متاحة عندما يكون الجهاز يصدر إشارة الاستيقاظ.

استخدام وضع العرض التجريبي

اضغط مع الاستمرار على الزر **▲ / DEMO** لمدة ثانيتين لتشغيل المنبه، ضوء الوميض والهزاز.

استخدام ضوء الفلاش

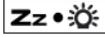أثناء العرض في الوقت العادي، اضغط مع الاستمرار على زر الـ  لتشغيل المصباح.

لإيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على زر الـ  مرة أخرى.

مؤشر حالة البطارية

عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا، يتم تقليل مستوى الاهتزاز، صوت المنبه و سطوع الشاشة. يظهر الرمز  بين أرقام الوقت. استبدل البطاريات ببطاريات قلوية AA جديدة.

البيانات الفنية / الميزات

وظائف: ساعة، منبه

أوضاع التنبيه: صوت، اهتزاز، ضوء وميض

البطاريات (غير مشمولة): AA × 3

المواصفات

77.5 KHZ	تردد RCC
دقيقة واحدة	مدة المنبه
من 5 إلى 60 دقيقة	مدة الغفوة
	الإعدادات الافتراضية:
24 ساعة	تنسيق الوقت
0:00	الوقت
6:00 (صباحًا)	المنبه
HI	مستوى المنبه والهزاز
05 (5 دقائق)	مدة الغفوة

معلومات السلامة

- اقرأ هذا الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.
- ضع جهازك على سطح مستقر وبعيدًا عن مصادر الضوء المباشر أو الحرارة الزائدة أو الرطوبة.
- احم الجهاز من الرذاذ أو تساقط الماء.
- احم أثاثك عند وضع الجهاز على الخشب الطبيعي والتشطيبات اللامعة باستخدام قطعة قماش أو مادة واقية بين الجهاز والأثاث.



التصريف

أنت ملزم بالتخلص من السلع الاستهلاكية بشكل صحيح وفقاً للوائح القانونية المعمول بها. الرمز الموجود على هذا المنتج يشير إلى أن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية في نقاط التجميع المناسبة التي توفرها السلطات المختصة بالنفايات. يجب التخلص من مواد التغليف وفقاً للوائح المحلية.



الصيانة

- نظف وحدتك بقطعة قماش ناعمة مبللة فقط بالماء والصابون المعتدل. المواد الأقوى مثل البنزين أو المذيبات أو المواد المشابهة يمكن أن تتسبب في تلف سطح الوحدة.
- إذا كنت لا تنوي استخدام الوحدة لفترة طويلة مثل شهر أو أكثر، قم بإزالة البطاريات لمنع التآكل المحتمل. إذا أصبحت حجرة البطارية متآكلة أو متسخة، نظف الحجرة جيداً واستبدل البطاريات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كانت ساعتك تعرض وقتًا غير صحيح أو لا تعمل بشكل صحيح ربما بسبب شحنة كهرباء ثابتة أو بطاريات مستنفدة، قم بإزالة البطاريات من ساعة المنبه الخاصة بك. انتظر بضع دقائق ثم أعد إدخال البطاريات أو استبدلها ببطاريات جديدة.

ستتم إعادة ضبط ساعة المنبه إلى إعدادات المصنع وستحتاج إلى إعادة ضبطها.

الضمان

تم إنتاج معدات AMPLICOMMS واختبارها وفقاً لأحدث طرق الإنتاج. تضمن تنفيذ المواد المختارة بعناية والتقنيات المتطورة للغاية التشغيل الخالي من المشاكل وعمر خدمة طويل.

مدة الضمان هي 24 شهرًا من تاريخ الشراء. لا تنطبق شروط الضمان على البطاريات القابلة لإعادة الشحن أو وحدات الطاقة المستخدمة في المنتجات. سيتم التخلص من جميع العيوب الناتجة عن أخطاء في المواد أو الإنتاج والتي تحدث خلال فترة الضمان مجانًا. يتم إلغاء حقوق المطالبات بموجب شروط الضمان بعد تدخل المشتري أو أطراف ثالثة. الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، أو التشغيل غير السليم، أو التثبيت أو التوصيل غير الصحيحين، أو الظروف الطبيعية أو التأثيرات الخارجية الأخرى لا تشملها شروط الضمان.

في حالة الشكاوى، نحتفظ بالحق في إصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة أو توفير جهاز بديل. تصبح الأجزاء أو الأجهزة البديلة ملكًا لنا. تُستثنى حقوق التعويض في حالة الأضرار التي لا يوجد دليل على القصد أو الإهمال الجسيم من قبل الشركة المصنعة.

إذا ظهرت علامات عطل في جهازك خلال فترة الضمان، يُرجى إعادته إلى منفذ البيع الذي اشتريته منه معدات AMPLICOMMS مع إيصال الشراء. يجب تقديم جميع الحقوق للمطالبات بموجب شروط الضمان وفقًا لهذا الاتفاق فقط فيما يتعلق بمنفذ البيع الخاص بك. بعد مرور سنتين من شراء منتجاتنا، لا يمكن تقديم مطالبات بموجب شروط الضمان.

خدمة العملاء

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة وأنت في المملكة المتحدة، يُرجى الاتصال بنا على الرقم 0844 800 6503 (باستخدام خط أرضي في المملكة المتحدة وقت الطباعة: تكلفة المكالمات 6 بنس رسوم اتصال ثم 5 بنس في الدقيقة. قد تختلف تكاليف الهواتف المحمولة). الخطوط مفتوحة من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً باستثناء العطلات الرسمية. إذا كانت لديك مطالبة بشأن الضمان لمدة سنتين، يُرجى الاتصال بموردك.

إعلان المطابقة

يفي هذا الجهاز بالمتطلبات المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبي: 53/2014 /



تم تأكيد الامتثال للتوجيه المذكور أعلاه برمز CE الموجود على الجهاز.

للاطلاع على إعلان المطابقة الكامل، يُرجى الرجوع إلى التنزيل المجاني المتاح على موقعنا الإلكتروني www.amplicomms.com.

اتصل بخط المساعدة في المملكة المتحدة على الرقم 0844 800 6503

(راجع فصل "خط المساعدة" للحصول على التفاصيل حول التكاليف وساعات العمل)

يتم تصنيع منتجات AllBeurer وتخضع لمراقبة الجودة باستخدام أكثر الأساليب تقدماً. من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنتاج، تختار الشركة بعناية المواد الخام، والتقنيات، وطرق العمل التي تضمن منتجات خالية من العيوب وطول عمر استثنائي.

مسؤوليتنا بموجب هذه الشهادة هي إصلاح (إما بأنفسنا أو من خلال شخص نيابة عنا) أي عيب أو خلل أو عطل (فيما يلي "العطل") تم اكتشافه في المنتج خلال فترة الضمان و/أو استبداله (كلياً أو جزئياً) حسب الحاجة، دون تكلفة، وفقاً لما يلي وباستثناء الحالات التي يثبت فيها أن العطل نتج عن تلف متعمد من قبل المستهلك.

على الرغم مما سبق ودون الانتقاص من عمومية ما سبق، إذا أثبتت شركة Getter قبل إصلاح المنتج أن العطل نتج عن أحد الأسباب التالية، فإن الضمان بموجب هذه الشهادة لن يسري، ويحق لشركة Getter المطالبة بدفع تكلفة الإصلاح، النقل، و/أو الاستبدال:

سوء نية أو إهمال من قبل المستهلك، مثل (ودون الانتقاص من عمومية ما سبق) الكسر لأي سبب كان، الضرر بالمعدات بسبب إهمال المستخدم أو تقصيره، إمداد طاقة غير منتظم، حريق أو التعرض لمصدر حرارة، تبلل المنتج بأي سائل، دخول جسم غريب، نقل مهمل أو حادث. أي محاولة لإصلاح من قبل طرف غير الشركة المصنعة أو مزود الخدمة تلغي الضمان.

إذا ظهرت على منتجك علامات عطل خلال فترة الضمان يرجى الاتصال بمزود الخدمة الذي اشترى المنتج منه مع تقديم فاتورة الشراء الأصلية، أو الاتصال بالمستورد باستخدام التفاصيل أدناه. يمكن تقديم أي طلب للإصلاح بموجب الضمان المفصل في هذا المستند فقط بعد تقييم العطل من قبل مزود الخدمة أو المستورد.

لا يغطي ضماننا أي أضرار غير مباشرة و/أو مباشرة ناتجة عن تشغيل منتج غير سليم و/أو تشغيل غير مطابق لتعليمات الشركة المصنعة، وفي أي حال، لن تكون شركة Getter و/أو ممثليها مسؤولين عن أي أضرار.

لا تتص محتويات هذه الشهادة على حقوق المستهلك بموجب أيّ قانون.

تخضع أحكام شهادة الضمان هذه حصريًا لقوانين دولة إسرائيل، وتكون الولاية القضائية فيما يتعلق بهذه الشهادة لمحاكم تل أبيب-يافا المختصة فقط.

اسم المنتج والطراز: _____
مكان وتاريخ الشراء: _____
* شهادة الضمان صالحة مع إثبات الشراء (فاتورة، إيصال).

Getter Group Ltd

7 Shimshon Street , Petach Tikva

Israel 4952706

Phone: [+972-3-5761544](tel:+972-3-5761544)

المستورد: مجموعة جيتزر المحدودة

شارع شمشون 7 - بيتاح تيكفا

الرمز البريدي: 4952706

الهاتف: +972-3-5761544

GETTER GROUP Ltd.

7 SHIMSHON ST. , P.O.B. 3901 PETAH TIKVA,
4952706 ISRAEL

TEL. 972-3-5761555 **FAX** 972-3-7523620

www.getter.co.il

مجموعة جيتزر المحدودة

شارع شمشون 7، صندوق بريد 3901،
بيتاح تيكفا، 4952706، إسرائيل

هاتف: 972-3-5761555

فاكس: 972-3-7523620

www.getter.co.il