

# GEEMARK STAR WAKE N SHAKE



## كيفية ضبط الساعة:

- نضغط على زر الساعة المسجل فيه SET (الثاني عن الجهة اليمنى على سطر الأزرار على الجانب العلوي من وحدة المراقبة). من خلال السهمين  $\uparrow$  /  $\downarrow$  يمكن تنظيم الساعات والدقائق. حيث سيتيح الضغط الآخر على SET الانتقال بين الساعات والدقائق، وتحديد عرض 24 hr / 12 hr، واتجاه الثواني.

## تشغيل الساعة المنبهة:

- من أجل تحديد الساعة المنشودة للاستيقاظ ينبغي الضغط باستمرار على الزر المكتوب عليه ALARM SELECT (الثاني عن الجهة اليمنى على سطر الأزرار على الجانب العلوي من وحدة المراقبة). ثم يمكن الضغط على أزرار السهمين  $\uparrow$  /  $\downarrow$  (على الجانبين الأيسر والأيمن على الجزء العلوي من وحدة المراقبة) من أجل تنظيم الوقت ثم الضغط مجددًا على ALARM SELECT لتنظيم الدقائق وبعد ذلك تحديد LOW / HIGH الذي يتيح تحديد شدة الرنة/ الارتجاج وكذلك تحديد F1/F2/F3 - شدة الصوت الاستيقاظ.
- لتحديد وضع اليقظة يرجى الضغط بسرعة على الزر المسجل ALARM SELECT (الثاني من جهة اليمين على سطر الأزرار على الجزء العلوي من وحدة المراقبة) ويمكن مشاهدة وضع اليقظة مضاء بمصباح على شاشة الساعة من جانبها الأيسر (هناك ثلاثة أوضاع

- يقظة على الشاشة - من الأعلى إلى الأسفل - الارتجاج، والصوت والوميض)
- يمكن ضبط شدة الصوت بالقرص الموجود على الجانب الأيمن الخلفي من الساعة.
- من أجل وقف الرنين في وقت الاستيقاظ يتم الضغط باستمرار على زر المصباح (الثالث عن اليسار على سطر الأزرار في الجزء العلوي من وحدة المراقبة).
- من أجل وقف وضع الغفوة، يتم الضغط على زر OFF أثناء الرنين (الزر الأيمن على سطر الأزرار في الجزء الأسفل من وحدة المراقبة).
- من أجل تعديل شدة الإضاءة للساعة - 3 مستويات من شدة الإنارة - يتم الضغط بسرعة على زر المصباح (الثالث عن اليسار على سطر الأزرار في الجزء العلوي من وحدة المراقبة).

### خيارات الاستيقاظ في الجزء الأيسر من الشاشة المضاءة (من الأعلى إلى الأسفل):

- الارتجاج فقط - خاصية مدعومة من قبل وسادة ارتجاج خاصة تتصل من خلال كابل على ظهر الساعة (موسوم برسم دائرة مع الحرف S وعلى جانبيه أربعة خطوط معرجة). يشار إلى أن شدة الارتجاج تتزايد.
- الصوت + الارتجاج (SOUND+VIBRATION)
- الارتجاج + الوميض (Flash+Vibration). (خاصية الارتجاج مدعومة من قبل وسادة ارتجاج خاصة تتصل من خلال كابل على ظهر الساعة (موسوم برسم دائرة مع الحرف S وعلى جانبيه أربعة خطوط معرجة)
- الصوت + الارتجاج + الوميض

### منظم إضاءة الشاشة:

- في الجزء العلوي من الجهاز هناك زر مع رمز مصباح (الثالث عن اليسار على سطر الأزرار في الجزء العلوي من وحدة المراقبة) حيث يتيح الضغط عليه ثلاثة أوضاع إنارة: الإنارة المنخفضة والإنارة المتوسطة والإنارة القوية.

### توصيل USB بظهر الساعة:

- يتيح شحن الهاتف الخليوي

### تعليمات السلامة لاستخدام مورد طاقة

- امنع تسرب الماء أو الرطوبة.
- أبعد عن درجات الحرارة الشديدة والأجهزة الباعثة للحرارة، مثل المشعاع، والفرن الساخن أو المكان المعرض لأشعة الشمس.
- أبعد عن الشموع المتوهجة، النار المكشوف، السجائر وغيرها.
- امنع سقوط الأجسام أو رش السوائل على المورد.
- تجنب ملامسة السوائل الخطرة، مثل الأحماض.
- اربط بمقيس مناسب فقط (على النحو المحدد على المورد).
- افصل المورد عن الكهرباء من خلال سحب المقيس فقط. لا يجوز السحب من الكابل.
- تأكد من أن الكابل موجه لكيلا يشكل خطر الوطاء أو يفشل.
- تحذير: لا يجوز أبدًا استبدال الفيتيل أو المقيس ببديل غير أصلية. وإذا لم يكن المقيس مناسبًا للمقيس، فاستخدم المهايئ المناسب حسب توصية الجهة المصنعة. وقد يسبب التوصيل الخاطئ تكهرب المستخدم.
- عند استخدام كابل التمديد ينبغي التأكد من صلاحية موصل التأريض ضمن الكابل.
- مصمم لاستخدام الوجه فقط وليس في مكان معرض للمطر وغير ذلك.
- ينبغي الحرص وصيانة الجهاز في وضع وظيفي جاهز للاستخدام.
- ينبغي إتاحة الوصول السهل إلى التوصيل وفصل مقيس التغذية عن شبكة الكهرباء.
- تيار إمدادات المخرج - 9V 250mA

**تحذير بشأن تعرض البطارية للحرارة**